

علایم مورد استفاده در لیبل

مورد استفاده در آزمایشگاه تشخیص پزشکی	IVD
به دفترچه ی راهنما مراجعه کنید.	
در دمای ۲ تا ۸ درجه نگه داری شود.	
تاریخ انقضا	
لات نامبر	LOT
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF

**در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره تلفن مندرج
بر روی جعبه، بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید**

پس از باز شدن به مدت ۶ هفته قابل استفاده است.

احتیاط

کیت باید در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری شود. این کیت فقط برای استفاده تشخیصی آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است. معرف ها فقط باید توسط پرسنل آزمایشگاه پزشکی تایید شده استفاده شوند. در کار با این معرف ها و نمونه های بیمار دقت زیادی به خرج دهید. دفع مواد زائد باید طبق قوانین آزمایشگاه انجام شود.

کنترل کیفی

با توجه به اینکه این محلول، به عنوان یک محلول Supplementary، جهت آگاهی از روند کنترل کیفی به بروشور کیت PTT مورد استفاده مراجعه شود.

محدوده ی نرمال

با توجه به اینکه این محلول، به عنوان یک محلول Supplementary، جهت آگاهی از محدوده ی نرمال، به بروشور کیت PTT مورد استفاده مراجعه شود.

محدودیت ها و تداخلات

با توجه به اینکه این محلول، به عنوان یک محلول Supplementary، جهت آگاهی از محدودیت ها و تداخلات به بروشور کیت PTT مورد استفاده مراجعه شود.

بهداشت و ایمنی

این کیت صرفاً برای استفاده توسط پرسنل واجد شرایط آزمایشگاه طراحی شده است در هنگام کار با معرف های آزمایشگاهی رعایت کردن اقدامات احتیاطی مورد نیاز ضروری می باشد این معرف ها غیر قابل خوردن و نوشیدن هستند در مورد چگونگی دور ریختن مواد قوانین تدوین شده عمل شود.

بروشور محلول کلسیم کلرید هموستیکا

شماره بروشور	SA06	REF
-----------------	------	-----

لطفا قبل از انجام آزمایش، اطلاعات موجود در برگه راهنمای انجام آزمایش را به دقت بخوانید

موارد مصرف

محلول کلسیم کلرید به عنوان یک محلول Supplementary در تست PTT به همراه کیت PTT مورد استفاده قرار می گیرد.

محتویات کیت

کیت حاوی ۱۰ ویال کلسیم کلرید ۰.۰۲۵ مولار آماده مصرف می باشد.

مواد و تجهیزات مورد نیاز که در کیت موجود نیست

(۱) کیت PTT (۲) دستگاه کواگولومتر در روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و بن ماری در روش دستی (۳) سمپلر برای روش دستی و نیمه اتوماتیک، (۴) دستکش (۵) نوک سمپلر (۶) چراغ مطالعه در روش دستی (۷) کورنومتر در روش دستی

آماده سازی و ذخیره معرف ها

محلول های موجود در کیت آماده ی مصرف می باشند و قابلیت استفاده همراه کیت PTT در روش های دستی و دستگاهی را دارد.

کیت در یخچال ۸-۲ درجه سانتیگراد نگه داری شود. محلول ها نباید فریز شوند. این معرف فقط باید توسط پرسنل آموزش دیده استفاده شود.

در صورت نگه داری در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، محلول تا پایان تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه قابل استفاده است.